

ZOLL AED 3™

Hurtigstartveiledning



ZOLL®

Velkommen

Takk for at du valgte ZOLL AED 3™ som automatisk ekstern defibrillator – den mest avanserte AED-enheten i verden i dag. Følg disse enkle instruksjonene for å sette opp AED 3 på noen få minutter. Når oppsettet er fullført, bør du notere serienummeret, logge inn på www.zollaed3.com og registrere AED 3 for å få utvidet garanti.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kan du kontakte ZOLL på +1-978-421-9655, sende oss en e-post på tservice_master@zoll.com eller kontakte den autoriserte forhandleren du kjøpte AED 3 hos.

Innhold

Dokumentasjonsmappe:

- Hurtigstartveiledning
- PlusTrac™-aktiveringssertifikat
- ZOLL AED 3 – redningsreferanseveiledning/plakat
- ZOLL AED 3 – brukerhåndbok

I esken:

- ZOLL AED 3
- Dokumentasjonsmappe
- CPR Uni-padz™
- ZOLL AED 3-batteri

Registrer AED

Logg inn på: www.zollaed3.com for å:


- Registrer deg og få 2 års utvidet garanti
- Opprett en PlusTrac-konto ved å bruke PlusTrac-aktiveringssertifikatet* og få PlusTrac det første året uten kostnad
 - Sporing av beredskapen til AED 3
 - Sporing av opplæringen av redningspersonell
 - Administrasjon av AED-programmet via nettet
 - Elektroniske påminnelser og varslinger
 - La AED 3 rapportere selvtestresultater automatisk til PlusTrac via det lokale Wi-Fi-nettverket
- Motta informasjon om å sette opp ZOLL-internettkonto for opplasting og administrasjon av kliniske hendelsesdata i ZOLL Case Review™

*aktiveringssertifikat finnes i dokumentasjonsmappen


Sette opp ZOLL AED 3




Ta alt innholdet ut av transportemballasjen.

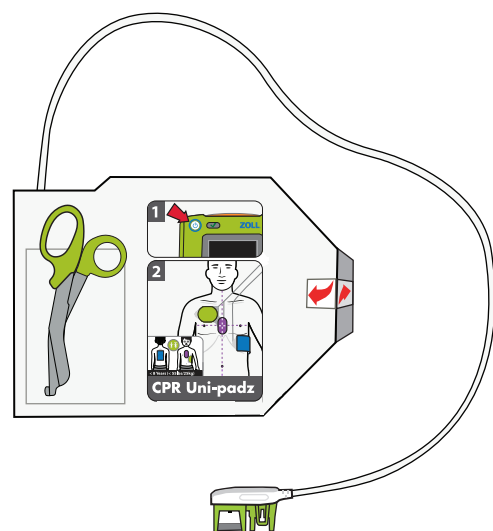


Ta CPR Uni-padz ut av esken.

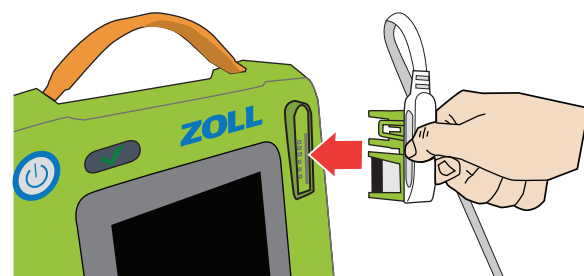


Koble CPR Uni-padz-kabelkontakten til AED 3-elektrodeporten.

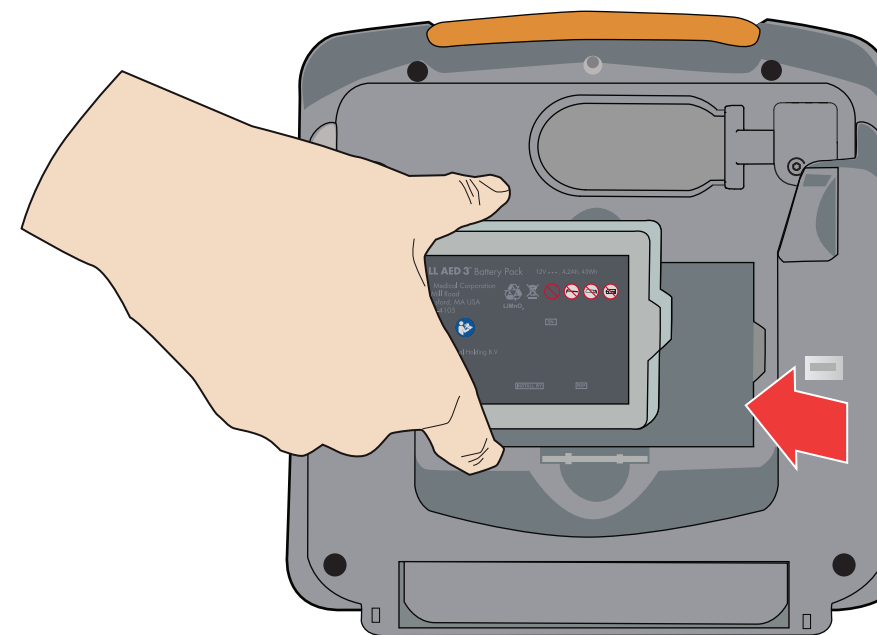

Ta AED 3-batteriet ut av transportemballasjen. Hold batteriet over sidetappene med etiketten vendt utover. Sett batteriet inn på baksiden av AED-enheten til det klikker på plass ved å plassere tappene på enden av batteriet overfor den tilsvarende fordypningen i batterirommet.

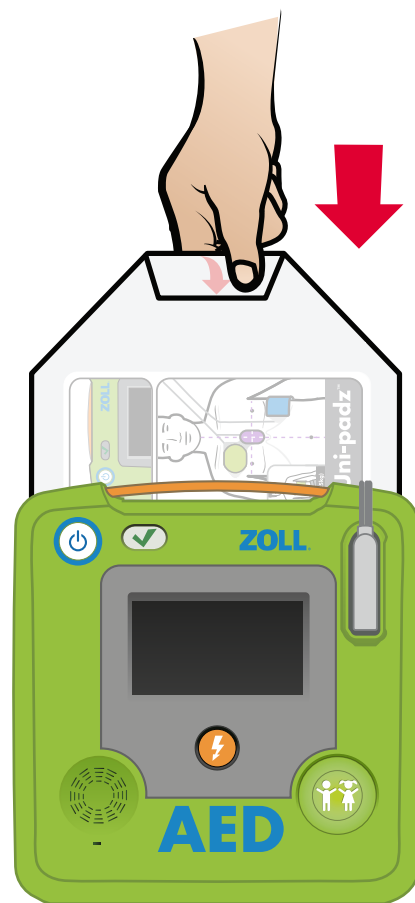

ZOLL AED 3 utfører en automatisk selvtest. Mens selvtesten utføres, setter du CPR Uni-padz inn på baksiden av AED slik at etiketten på pakken er vendt mot deg.

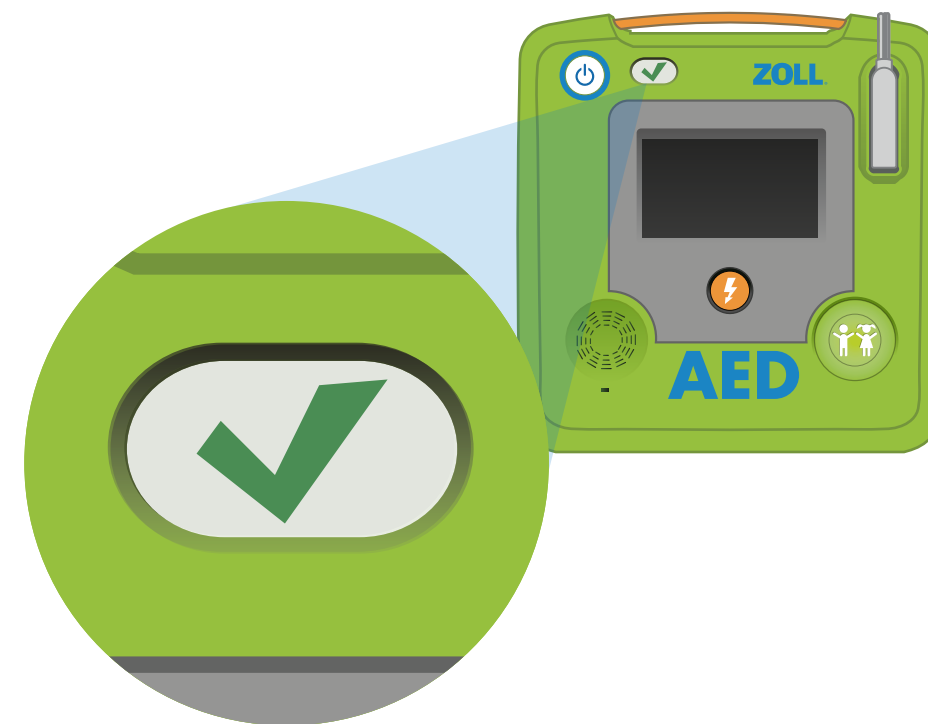

Etter at AED 3-selvtesten er fullført, kontrollerer du at den ble bestått ved å høre talemeldingen "Apparat OK" eller se en grønn hake i statusindikatorvinduet. AED 3 er nå klar til bruk. Hvis du har spørsmål, kan du se i brukerhåndboken som finnes i dokumentasjonsmappen.

Spørsmål:

Kontakt ZOLL teknisk service eller den lokale autoriserte ZOLL-representanten

ZOLL teknisk service:

Telefon: +1-978-421-9655

E-post: tservice_master@zoll.com